


OMRON

Je gegevens overdragen naar de nieuwe OMRON connect-app



Methode 1: OMRON connect Cloud

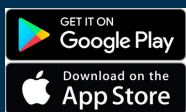

1. Download de nieuwe Omron connect-app via je App Store.

Zoek naar
OMRON connect
US/CAN/EMEA.

2. Log in op Omron connect US/CAN/EMEA met je normale gebruikersnaam en wachtwoord voor je Omron connect Cloud-account.

Als je je gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, tik je in het inlogscherf op "Hulp bij aanmelden".

3. Nadat je bent ingelogd, kun je de verbinding tussen je Omron-apparaten en de nieuwe Omron connect-app testen.

4. Je kunt alle gegevens in je Omron connect-app nu in de nieuwe Omron connect-app bekijken.



Methode 2: Overdragen zonder de Cloud

Android

1. Open de huidige OMRON connect-app.
2. Tik in dit scherm op "Nieuwe app downloaden".



3. Download de nieuwe Omron connect-app via Google Play.





Zoek naar OMRON connect US/CAN/EMEA.

4. Volg de instructies op het scherm om een account in de nieuwe Omron connect-app aan te maken.

Opmerking: Om je privacy te beschermen, is er een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om gezondheidsgegevens in Omron connect op te slaan en te bekijken, zelfs als deze gegevens lokaal op je telefoon worden opgeslagen.

5. Wanneer de app is ingesteld, tik je op de knop "Migratie starten".

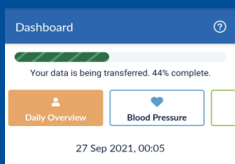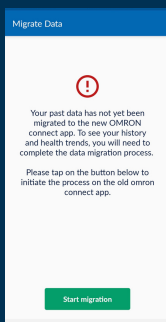


6. Je gegevens worden automatisch overgedragen naar de nieuwe Omron connect-app.

Wacht totdat dit proces voltooid is.

7. Deactiveer de oude OMRON connect-app.

Deze stap is nodig om conflicten met gegevensoverdracht tussen de oude en de nieuwe app te voorkomen.

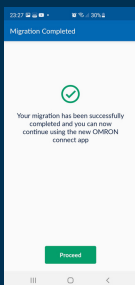

8. Je ziet het bevestigingsscherm wanneer de migratie is voltooid.



Methode 2: Overdragen zonder de Cloud

1. Open de huidige OMRON connect-app.

2. Tik in dit scherm op "Nieuwe app downloaden".



3. Download de nieuwe Omron connect-app via de App Store.


Zoek naar
OMRON connect US/CAN/EMEA.



4. Volg de instructies op het scherm om een account in de nieuwe Omron connect-app aan te maken.

Opmerking: Om je privacy te beschermen, is er een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om gezondheidsgegevens in Omron connect op te slaan en te bekijken, zelfs als deze gegevens lokaal op je telefoon worden opgeslagen.


5. Wanneer de app is ingesteld, tik je op de knop "Migratie starten".

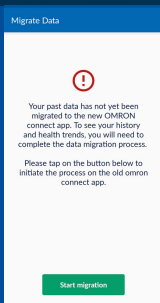

6. Volg de migratie-instructies in de oude app en tik op de knop "Gegevens migreren"

Wacht totdat dit proces klaar is.

7. Kies de nieuwe OMRON connect-app.

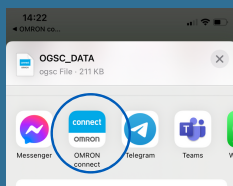

8. Schakel de oude OMRON connect-app uit.

Dit is nodig om conflicten over gegevensoverdracht tussen de oude en de nieuwe app te voorkomen.

9. Je ziet het bevestigingsscherm wanneer de migratie is voltooid.

